



REINIGING EN VOORDESINFECTIE VAN INSTRUMENTEN

Anios'Clean Excel D

PRE-DESINFECTEREND REINIGINGSMIDDEL VAN INSTRUMENTEN

- Gepatenteerd concept
- Een unieke combinatie van werkzame stoffen in synergie
- Niet-corrosief, compatibel met een breed scala aan medische materialen




Anios'Clean Excel D

Pre-desinfecterend reinigingsmiddel van instrumenten


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Helderblauwe vloeistof
- Product pH (onverdund): min 6,5 - max 7,5
- pH bij 0,5% in leidingwater: 7,4
- pH bij 0,5% in onthard water: 7,6
- pH bij 0,5% in gedemineraliseerd water: 6,6


GEBRUIKSAANWIJZINGEN

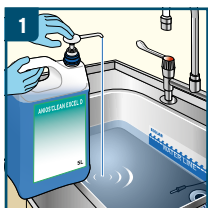


1 Geconcentreerde oplossing. De bijbehorende pomp vóór het eerste gebruik opstarten. Onderdompelen in de juiste verdunde verhouding met inachtneming van een minimale contacttijd van 5 min.

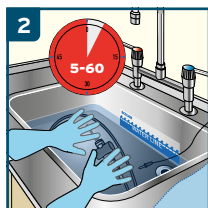

2 Dompel het medische hulpmiddel volledig onder. Houd het dompelbad afgesloten tijdens de contacttijd. Borstelen wanneer zichtbare vlekken aanwezig zijn.

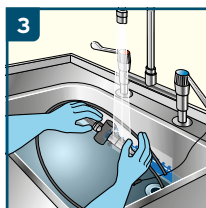

3 De medische hulpmiddelen overvloedig spoelen met leidingwater om alle sporen van product en organisch vuil te verwijderen.

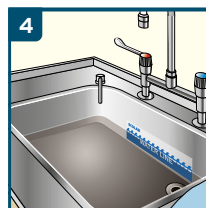

4 Vervang de oplossing zodra deze zichtbaar vuil is en ten minste één keer per dag om de doeltreffendheid van het product te behouden.

MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

| EIS/VOORWAARDEN | CONCENTRATIE | INWERKTijd |
|--|--------------|------------|
| Bacteriedodend* volgens EN 13727/EN 14561 | 0,5% | 5 min |
| Schimmeldodend* volgens EN 13624/EN 14562 | 0,5% | 15 min |
| Tuberculosedodend* volgens EN 14348/EN 14563 | 2,0% | 60 min |
| Actief op omhulde virussen volgens EN 14476/EN 17111 | 0,5% | 15 min |
| Actief op het Polyomavirus SV40* volgens EN 14476/EN 17111 | 2,0% | 60 min |
| Volgens VAH (bacteriedodend*, gistdodend*) | 1,5% | 15 min |

* = vervuilingsgraad

VERPAKKING EN BESTELINFORMATIE

| PRODUCT | VERPAKKING | REF |
|---------------------|------------|---------|
| Anios'Clean Excel D | 12 x 1 L | 3119700 |
| Anios'Clean Excel D | 2 x 5 L | 3119740 |



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Verdeeld door:

ECOLAB BV
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België
Tel.: 02 467 51 50

ECOLAB BV
Oude Rijnhofweg 17
2342 BB Oegstgeest
Nederland
Tel.: 071 524 12 00



DUOMED



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TOEPASSINGSGBIED

Reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen: chirurgische en medische instrumenten, warmtegevoelige instrumenten en endoscopisch materiaal voor hun sterilisatie.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Geconcentreerde oplossing. De bijbehorende pomp vóór het eerste gebruik opstarten. Onderdompelen in de juiste verdunde verhouding met inachtneming van een minimale contacttijd van 5 min.
2. Dompel het medische hulpmiddel volledig onder. Houd het dompelbad afgesloten tijdens de contacttijd. Borstelen wanneer zichtbare vlekken aanwezig zijn.
3. De medische hulpmiddelen overvloedig spoelen met leidingwater om alle sporen van product en organisch vuil te verwijderen.
4. Vervang de oplossing zodra deze zichtbaar vuil is en ten minste één keer per dag om de doeltreffendheid van het product te behouden.

INGREDIËNTEN

Didecylidimethylammoniumchloride, Chloorhexidinedigluconaat, niet ionische actieve stoffen, parfum, Kleurstof, excipienten.

OPSLAG

Gevaarlijk - respecteer de voorzorgsmaatregelen voor gebruik (opgesteld volgens de geldende Europese regels voor de classificatie en etikettering van chemische producten).

CERTIFICATEN

Medisch hulpmiddel. De volledige antimicrobiële activiteit voor Anios'Clean Excel D is opgenomen in het wetenschappelijk dossier, verkrijgbaar op aanvraag.

VEILIG GEBRUIK VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Lees het etiket en productinformatie.